

Activital. × POWERAGING パワーエイジングベルト (滑車式腹圧ベルト)

Activital.
アクティバイタル

強圧
SUPER
HARD
強弱自在

POWERAGING BELT

かっしやしき

滑車式腹圧ベルト

腰部保護 / 腹圧強化 / ハードトレーニング



腰の不安なく動きたい方に

滑車システム採用で強圧サポートを実現！

従来の腰痛ベルトよりも滑車の力で強圧に締め上げられるスーパーハードタイプ。
腰部をしっかりサポートしながら腹圧を強化し、姿勢を整え腰への負担を軽減。
痛みや不安を恐れずに思い切り動きたいプレイヤーのための腹圧ベルト。

Activital. × POWERAGING パワーエイジングベルト (滑車式腹圧ベルト)

アクティバイタル
Activital.

POWERAGING

パワーエイジングベルト (滑車式腹圧ベルト)

ご使用前に必ずお読みください

ご注意

本品を安全に長くご使用いただく為に、下記を必ず守ってご使用ください。

装着時に引っ張る際はストラップをしっかり握って引っ張ってください。

指をリングに引っ掛けて強く引っ張ると千切れる可能性があります。

ストラップを外す時は、リングを優しく持って、優しく剥がしてください。

着用方法

インナーの上から使用してください。痛みや不快感を感じたら緩めたり外して休憩しながらご使用ください。

使い初めは10～30分からのお試しでの使用をおすすめします。

01

メッシュ生地と面ファスナー切替部

02

ストラップを上記の赤線の位置にセットします。

03

ジャストフィットに近い状態でベルトを装着してください。

04

ストラップをゆっくり剥がしベルトを再度調整してください。

05

ベルトが体の真ん中に来るようにセットしてください。

06

上下の骨に当たらないようにベルトの位置を調整してください。

07

ストラップを面ファスナー部分に取り付けたら完成。

※左右のストラップはクロスする場合がございます。

ベルト (本体ベルト)

人間工学設計で肋骨の下から腸骨の上に収まるように、前面を細くする事で骨に当たらずに腹圧をしっかりサポートでき、痛みや苦しさを感じにくく着用できるように設計しました。(身長や体型等により、骨に当たる場合もあります)

メッシュ

メッシュ生地ですれにくく、通年快適にご使用できます。

滑車プレート

滑車の作用で簡単に力強くベルト着圧を変えられます。

ストラップ

引っ張るだけで滑車の力を使いベルトを締められます。

お手入れ方法

●40℃以下の温水で手洗いして、陰干ししてください。●直射日光が当たる場所に置かないでください。●ねじったり、絞ったりしないでください。型崩れの原因となります。●つけ置き、洗濯機、アイロン、乾燥機、漂白剤の使用はお止めください。

ご使用上の注意

●製品の性質上、摩擦、汗、水濡れにより、色落ちしたり、洋服に色移りすることがありますので、ご注意ください。●素材の特性上、やや匂いが強く感じられる場合がありますが不良ではございません。●強く引っ張って、爪や鋭利な物による接触は傷や破損、裂ける原因となりますのでご注意ください。●本製品は、表裏を治療するものではありません。●本製品は、腰部および腹部のサポートを目的としています。●完全な使用部位の保護を保証するものではありません。●就寝中は使用しないでください。●妊娠中、または妊娠の可能性がある方は使用しないでください。●装着部周辺に傷、腫物、かゆみ、発疹など肌に関する異常のある方は本品を使用しないでください。●傷、かぶれ等お肌に異常を確認した場合はご使用中止してください。●疾患やケガ後のご使用は必ず医師に相談してください。●まっすぐ締め付けすぎないように注意してください。●真体を傷つけた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。●サイズが合わないものや放置おける着用はお控えください。●破損や異常な形状を確認した場合は使用しないでください。●直射日光がある場所や火のそば、高温・多湿の場所に置かないでください。●保管する場合は子供の手の届かない場所に保管してください。●本来の使い方以外では使用しないでください。●製品の性質上、摩擦、汗、水濡れ等により、色落ちしたり、洋服に色移りすることがありますので、ご注意ください。

Activital. × POWERAGING

アクティバイタル パワーエイジングベルト (滑車式腹圧ベルト) 男女兼用

■材質/ポリエステル ■サイズ展開/M・L・XL・XXL ■中国製

適応ウエストサイズ

M 65～80cm XL 95～105cm

L 80～95cm XXL 105～120cm

※サイズは目安です。

紙 外箱 袋

WASHING INSTRUCTIONS

JAN